



PARFUM AGRÉABLE



Hexaquart® XL

Concentré exempt d'aldéhydes pour la désinfection et le nettoyage

Hexaquart® XL

Large spectre d'action

PARFUM AGRÉABLE

PROPRIÉTÉS

- Concentré exempt d'aldéhydes pour la désinfection et le nettoyage du mobilier et des sols
- Action nettoyante très efficace
- Très bonne compatibilité avec les matériaux
- Spectre d'action complet
- Action contre les bactéries (y compris SARM, mycobactéries) et les champignons ; action virucide limitée PLUS (virus enveloppés plus adéno-, noro- et rotavirus)
- Action rapide
- Très économique
- Utilisable dans le système de distribution de lingettes B. Braun Wipes, durée de conservation de 4 semaines



Sur les listes DGHM/VAH ainsi que sur la liste des virucides de l'IHO

SPECTRE D'ACTION / TEMPS D'ACTION

Domaine d'utilisation	Conc.	TA	Quantité de concentré / 1 l
Désinfection des surfaces selon DGHM/VAH	2.0%	5 min.	20 ml
Bactéricide/levuricide EN 16615 (test 4 champs), EN 13697	1.0%	15 min.	10 ml
	0.5%	30 min.	5 ml
Mycobactéricide EN 16615	3.0%	60 min.	30 ml
Tuberculocide EN 14348	1.0%	60 min.	10 ml
	2.0%	60 min.	20 ml
Action virucide limitée (y compris VHB, VHC, VIH) EN 14476	0.5%	60 min.	5 ml
	1.0%	5 min.	10 ml
Action virucide limitée PLUS EN 14476	2.0%	60 min.	20 ml
Rotavirus EN 14476	1.0%	5 min.	10 ml
Adénovirus EN 14476	1.5%	30 min.	15 ml
Norovirus* EN 14476	3.0%	15 min.	30 ml
	2.0%	60 min.	20 ml

* Virus de substitution MNV

INDICATIONS D'UTILISATION ET DE DOSAGE

La solution est utilisée avec de l'eau (25 °C max. ; cf. tableau des dosages). Le dosage peut s'effectuer au moyen d'une mesurette, d'une pompe doseuse, ainsi que d'unités de dosages centralisées ou décentralisées. Asperger suffisamment les surfaces et laisser sécher sans lessiver. Ne pas associer à des produits à base d'aldéhydes.

COMPATIBILITÉ DES MATÉRIAUX

Utilisable avec : métaux, matières plastiques, par ex. polyméthacrylate (plexiglas), élastomères et sols.

Article	U	N° d'art.	Pharmacode
Flacon 1000 ml	1	19940	7670100
Bidon 5 litres	1	19941	7670123

Données physico-chimiques (concentré)

Aspect : jaune / orange
Densité : 1 g/ml
Valeur pH : env. 11 - 12

Remarque: Utiliser les désinfectants en toute sécurité. Toujours lire l'étiquetage et l'information produit avant toute utilisation.

Hexaquart® XL – Composition

100 g contiennent :
9.9 g de N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine, 6.0 g de chlorure de didécylméthylammonium.
Indications selon le règlement (CE) n°648/2004 relatif aux détergents : < 5% tensioactifs non-ioniques, agents complexants, parfum, inhibiteurs de corrosion, colorant.

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market : Tél. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market : Tél. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com